

Organisation d'un prélèvement d'un Covid-19 à l'extérieur du laboratoire

1. Description et domaine d'application

Ce document décrit les modalités de préparation d'un prélèvement de Covid19 pour l'envoi au plateau technique spécialisé St Roch du laboratoire SYNLAB-BARLA à Nice.

Il s'applique aux personnes habilitées à réaliser le prélèvement ainsi qu'aux personnes habilitées au Tri-envoi pour la réalisation de l'envoi.

Au préalable, une convention de prestations doit être établie entre l'organisme et le laboratoire ou un contrat d'exercice entre le professionnel de Santé préleveur et le laboratoire.

2. Livraison du matériel de prélèvement

- a. **Pour les campagnes dépistage de groupe** (plus de 10 personnes, même lieu, même plage horaire) :
 - i. L'organisme extérieur doit adresser sa demande de « campagne » de dépistage » au service qualité via l'adresse mail : qualite@labo-barla.eu. 48h ouvrées à l'avance
 - ii. Le service qualité retourne une proposition de date et d'horaire, un fichier Excel à compléter pour référencer les patients concernés
 - iii. Si le prélèvement est réalisé par le personnel de l'organisme, le laboratoire porte à sa disposition le matériel de prélèvement et les fiches étiquettes code à barre de chaque patient. Les deux parties s'entendent sur le lieu de mise à disposition le plus pratique.
- b. **Pour les prélèvements au cas par cas :**

Le professionnel habilité commande le matériel nécessaire sur le e-shop préleveur du laboratoire <https://labo-barla.eu/preleveurs/e-shop/>. Ce matériel est porté à sa disposition 48h ouvrées plus tard sur le laboratoire SYNLAB-BARLA choisi lors de la signature de son contrat.

3. Envoi des échantillons prélevés :

Le matériel nécessaire à la réalisation et à l'emballage du prélèvement Covid-19 est :

- Écouvillon naso-pharyngé **déchargé dans le tube identifié** (ne pas laisser l'écouvillon dans le tube, même « cassé »).
- Milieu de transport : RNA/DNA Purification Kit DaAnGen
- 2 sachets de transport (1 sachet transparent avec buvard et 1 sachet de couleur) pour respecter le triple emballage.

Préparation du kit d'envoi :

- Après le prélèvement, le tube doit être refermé avec soin.
- Le tube doit être identifié :
 - o si prélèvement au cas par cas : de manière manuscrite indélébile : nom, prénom, date de naissance
 - o si prélèvement de groupe : avec l'étiquette signalée en rouge sur la photo ci-dessous,
- Le tube est inséré dans la poche intérieure du sachet transparent avec le buvard, bien sceller le sachet.
- Glisser le sachet transparent dans la poche Intérieure du sac Kangourou de couleur, bien sceller le sachet de couleur. Si prélèvement de groupe, étiqueter le sachet de couleur avec l'étiquette signalée en violet sur la photo ci-dessous.
- Placer la feuille de renseignements cliniques complétée (toujours renseigner le tel portable et le mail du patient, cela conditionne l'envoi de son résultat) ou le reste de la planche d'étiquettes dans la poche kangourou externe du sachet de couleur.
- Pour les urgences des cliniques, rajouter sur le sachet externe l'étiquette rouge « Urgences Cliniques Synlab xx ».
- Déposer les sachets au laboratoire choisi qui colisera le sachet au départ vers le plateau technique.

Attention : un seul patient par sachet

Cas des prélèvements pour lesquels des analyses de sang sont également prescrites :

Faire la prise de sang. Coller les étiquettes sur les tubes prélevés. Placer les tubes dans un sachet à part. **NE JAMAIS MELANGER PRELEVEMENT COVID 19 ET PRISE DE SANG.**

Conservation des prélèvements :

Les prélèvements sont conservés à température ambiante durant 24h et à -20°C en cas de délais prolongés au-delà de 24h.

Procédure de désinfection :

Désinfection avec un nettoyant EN14476 type Bactopin Plus ou Steranio 2%. Laisser tremper le matériel à décontaminer durant 60 minutes puis rincer à l'eau potable.

4. Résultats

Les résultats seront disponibles entre 24h et 48h à compter de l'heure de réception de l'échantillon au PT St Roch à Nice. Ils sont disponibles par connexion sur le serveur de résultat « mesresultats.synlab.fr »

Pour les prélèvements de groupe le préleveur doit remettre l'étiquette signalée de vert sur la photo ci-dessous.

Doss. 1234412 du 09/02/2021 15:04 - COV 69 80 00 Fournitures Accessoires Consommables Informatique - LABORATOIRE Enreg. par: ELU

F - né(e) le 20/08/1973 - 47 ans
Mme TEST1 Elsa
NdNa.: TEST1

Priv.: le
Internet ID : non-spécifié, véhicule : non-spécifié
Corres. :
Prescript. 1 :
Prescript. 2 :
Prescript. 3 :
Trans. Patient : MySynlab

Mobile: - Email: depistage.pcr@BLA.synlab.fr
COVID_REP

A remettre au patient

Compte MySynlab Elsa mesresultats.synlab.fr Identifiant : F468754	TEST1 Elsa 1234412 - 2021/02/09 15:04 Coupon à présenter au laboratoire pour retirer vos résultats	Coordonnées Patient <input type="checkbox"/> Infos Prescripteur <input type="checkbox"/> Analyses <input type="checkbox"/> Contrôlé par <input type="text"/>	ORDO - dossier: 1234412 Créé le 2021/02/09 à 15:04 TEST1 Elsa DdN: 20/08/1973 - 47 ans No SS: AMO: AMC:
ORDO - dossier: 1234412 Créé le 2021/02/09 à 15:04 TEST1 Elsa 0001234412	ORDO - dossier: 1234412 Créé le 2021/02/09 à 15:04 TEST1 Elsa 0001234412 Étiquette sachet	Planche Etiq. - dossier: 1234412 Créé le 2021/02/09 à 15:04 TEST1 Elsa 0001234412 Étiquette tube	1234412 - F - DdN: 20/08/1973 TEST1 TEST1 Elsa COVID_REP 100001626556 à COV F207 1234412 - F - DdN: 20/08/1973 TEST1 TEST1 Elsa
1234412 - F - DdN: 20/08/1973 TEST1 TEST1 Elsa	1234412 - F - DdN: 20/08/1973 TEST1 TEST1 Elsa	1234412 - F - DdN: 20/08/1973 TEST1 TEST1 Elsa	1234412 - F - DdN: 20/08/1973 TEST1 TEST1 Elsa