


RECOMMANDATIONS POUR LES PRELEVEMENTS D'ANALYSES BIOLOGIQUES									
PT de Nice **			1 grand sec gel	1 tube citrate	1 EDTA gel <i>pour</i> chacun	1 tube EDTA	1 tube fluoré <i>pour</i> chacun	1 tube sec urine <i>pour</i> chacun	e-Swab
ATTENTION ! Selon votre secteur géographique									
1 grand sec gel	1 grand sec gel		Ac anti Beta2GP1 Ac anti cardiolipine Ac anti DNA Ac anti ENA Ac anti endomysium Ac anti gliadine Ac anti LKM Ac anti nucléaire Ac anti peau Ac anti pept citru Ac anti PMSCL Ac anti SLA Ac anti SP100	IL2R IgE Spécifique (RAST) IgE totaux NSE *** Ac TPO Rubeole+1pt SBG Trophatop	Anti XA ***+TTT+HP AT3 D-Dimère Fibrine Héparine***+TTT+HP PRC PRS TCK/TCa + TTT TPINr + TTT	BNP Charge virale HBV Charge virale HCV Charge virale HIV Crosslaps/CTX Homocystéine ***	Aldostérone *** Num. Formule Plaquettes** Rénine *** Réticulocytes VS	Alcool Glycémie GPP Lactates ***	Chimie urinaire Coïne CXT Drogue urinaire Mycoplasmes urinaires PUS PUSCO PU
Acide Urrique Albumine Amylase Bilirubine T ou D Calcium Cholestérol Coel. Sat. Fer CPK CRP Créatinine Fer GGT Glycémie HDL, LDL Ions(Na/K/Ca) LDH Lipase Magnésium Phosphore PAL Protéines Réserve Alcaline Transa TGO/TGP Transferrine Triglycérides Urée	Albumine Ac Anti-FI Ac Thyroglob Ac PoB B2microglob ACE Barbitémie+HP BW (Syphilis)+1pt C3(complément) CRP Calcitonine CA153 CA199 Covid IgG/IgM Cortisol à 8h DellaAndrostéone Dépâkine+HP Digoxime+HP Fact Rhum(WR)+1pt Haptoglobuline Hépatite A+1pt Hépatite B+1pt Hépatite C+1pt HIV+1pt Lyme sérologie+1pt Mycopneumo+1pt Orosomucide Peptide C Phénytoïne Préalbumine PTH Tégréto+HP Varicelle/Zona+1pt Vit D/25D2D3	Ac Anti-FI Ac Thyroglob Ac PoB ACE AFP AMH BHC+DDR CA125 CA153 CA199 Cortisol à 8h Estradiol+DDR Ferritine Folates FSH+DDR Hépatite A+1pt Hépatite B+1pt Hépatite C+1pt HIV+1pt Lyme sérologie+1pt LH+DDR Procaltionine Progesterone+DDR Prolactine+DDR PSA T+L SDHEA T3L T4L Testostérone totale Thyroglobuline Toxo+1pt TSH Vt B12 Vt B9	IL2R IgE Spécifique (RAST) IgE totaux NSE *** Ac TPO Rubeole+1pt SBG Trophatop	IL2R IgE Spécifique (RAST) IgE totaux NSE *** Ac TPO Rubeole+1pt SBG Trophatop	AT3 D-Dimère Fibrine Héparine***+TTT+HP PRC PRS TCK/TCa + TTT TPINr + TTT	BNP Charge virale HBV Charge virale HCV Charge virale HIV Crosslaps/CTX Homocystéine ***	Aldostérone *** Num. Formule Plaquettes** Rénine *** Réticulocytes VS	Alcool Glycémie GPP Lactates ***	Chimie urinaire Coïne CXT Drogue urinaire Mycoplasmes urinaires PUS PUSCO PU
ATTENTION ! Selon votre secteur géographique									
1 petit sec gel	1 grand sec gel		Gastrine *** Somatomédine (IGF1) ***	Acides biliaires Chaines légères Kappa Chaines légères Lambda	Elipot ACTH ***	1 tube EDTA +aprotinine ACTH ***	1 tube EDTA <i>pour</i> chacun Cébsosome+HP Fol. érythrocytaire HBA1C Lympho NK CD57/56 Lympho T4/T8 Myoglobine PCR MVT RAI ** Groupe sanguin** Tacrolémine+HP	1 tube borate CBU (si fluo très peu peu rempli < à l'ini ne pas transvaser et conserver à 4°)	Recherche par PCR : Chlamydiae Coqueluche covid Hépatites Mycogentium Neisseria G.
ATTENTION ! Selon votre secteur géographique									
(1) Le Plateau Technique de Cannes concerne les laboratoires de Cannes, Cannes-la-bocca, Mandelieu et Grasse. Le PT de Nice concerne tous les autres laboratoires.									
Légende :									
**Mardi de se référer à lab									
INFORMATION pour les infirmiers libéraux : 1pt = prendre 1 petit tube sec gel en plus									
DDR = date dernières règles HP = heure prise médicament TTT = traitement avec positivité									

RECOMMANDATIONS POUR LES PRELEVEMENTS D'ANALYSES BIOLOGIQUES

- 1/ Associer dans un sachet par prélèvement : tube + fiche de prélèvement / ordonnance
- 2/ Respecter l'ordre de prélèvement
- 3/ Respecter le volume de remplissage

Tubes citrate : au dessus de la bande dépolie sur la paroi du tube

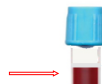

Autres tubes : au niveau de l'indicateur de remplissage sur l'étiquette



- 4/ Homogénéiser les tubes par 8 à 10 retournements lents
- 5/ Identifier les tubes selon la procédure et si utilisation d'une étiquette :

Sur le côté : toujours laisser visible le niveau de remplissage et la date de préemption



En hauteur : coller l'étiquette à raz du bouchon et sens de lecture du nom du patient de haut vers le bas

- 6/ Le transport des échantillons : dans les malles en présence d'un pack réfrigérant dès que la T° extérieure > 25 °C
- 7/ Cas particuliers :

Délais pour déposer les prélèvements au laboratoire	Prélèvements urinaires	Dossiers urgents	Non réalisable par des infirmiers extérieurs sauf si pré analytique respecté
< à 2h si Glycémie sur tube sec gel à 4h pour l'analyse TCA et ACTH < 48h pour les urines collectées sur tube borate < à 6h pour le reste des analyses	< Utiliser les tubes des collecteurs spécifiques biochimie et bactériologie Pour les comptes d'Addis : transmettre le pot avec 10ml minimum	Ajouter une collerette orange fluo sur la bague des tubes	Lactates, homocystéine, gastrine, CH50 et somatomédine (IGF1) Héparines